



Cluster headache (NRB)* mask/ 8140

Použití:

Pacient si napojí volný konec spojovací hadice na výstup kyslíku na LIV[®] lahvi. Otočí a spustí hlavním uzávěrem na boku lahve přívod kyslíku, nastaví na regulátoru průtoku lékařem naordinovaný průtok (7, 10 nebo 15 l/min). Naplní plastový vak, upevní si masku na obličej, pevně přitiskne, upevní kovové úchyty na kořeni nosu a zhluboka si dýchá 5 – 15 minut dle potřeby (za stále otevřeného přívodu kyslíku do vaku s maskou), kdy začne bolest ustupovat. Pokud je s pacientem v době záchvatu bolesti přítomna další osoba, tato zajistí, aby po použití byl uzavřen hlavní uzávěr kyslíku. Pokud je pacient sám a jeho stav dovolí, je nutno hlavní uzávěr kyslíku uzavřít.

Pokud je pacient sám a usne dříve, než uzavře uzávěr, je pravděpodobné, že mu kyslík z lahve vyprchá. Z bezpečnostních důvodů je nutno co nejdříve (okamžitě po procitnutí) kyslík z místnosti dobře vyvětrat.



*NRB = Non-ReBreathable